


EMPFEHLUNGEN ZUR ENTNAHME



Der Beutel / die Folie ist durch gleichmäßiges Aufziehen, beginnend an einer Ecke an der schmalen Seite, zu öffnen.


Man erhält das sterile Produkt ohne Kontaminierung.

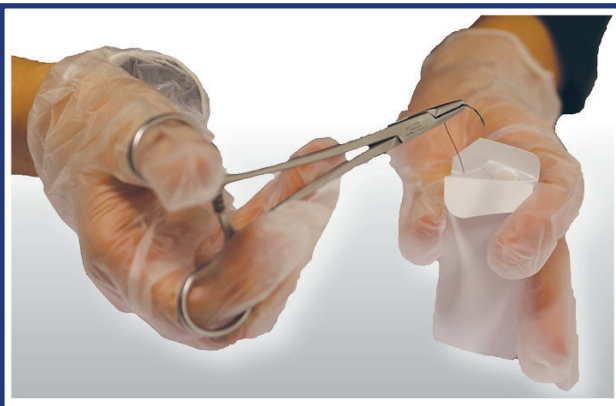

■ Einzelne Nadel-Faden Kombination

Die perforierte Lasche umbiegen, die Nadel wird sichtbar.

Hinweis: Die Nadel ist zum Schutz in einem medizinischen Schaum eingestochen. Die Nadel mit einem Nadelhalter entnehmen.

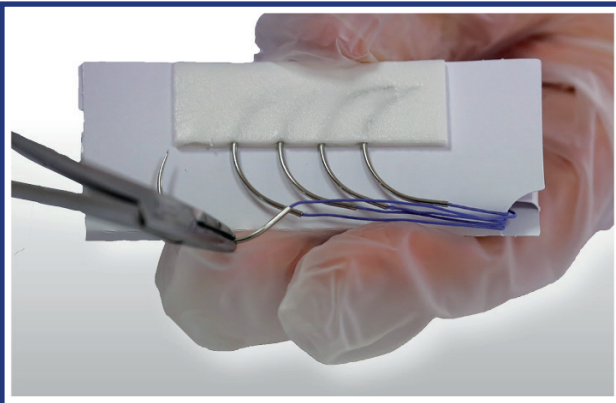

■ Multipack mit Nadeln

Den Fadenträger öffnen, um die Nadel-Faden-Kombinationen freizulegen.

Hinweis: Die Nadeln sind zum Schutz in einem medizinischen Schaum eingestochen.

Die einzelnen Nadeln mit einem Nadelhalter nacheinander entnehmen, diese **langsam** zum eigenen Körper hin herausziehen.



■ Multipack ohne Nadeln

Die Lasche öffnen und die Fäden einzeln entnehmen.

Diese Empfehlung bezieht sich auf die Nahtmaterialarten MARICRYL, MARILON, POLYESTER und GREENFIL.